



Viofor JPS System Classic Vezérlő Ref. No.: 1031



A Viofor JPS System Classic **ajánlott mind a szakemberek, mind az egyéni felhasználók** számára, hogy folytatni tudják a rehabilitációt otthon is. Lehetővé teszi a magnetostimulációs kezelések paramétereinek pontos beállítását. Támogatja a pontszerű, kis és közepes felületű alkalmazást és a szisztémás applikátorokat, ami sokoldalúvá teszi bármely rehabilitációs praxisban.

A HASZNÁLAT BIZTONSÁGA

A Viofor termékek használatára vonatkozó javallatokat klinikai szakértők értékelték az orvostudomány számos területén, és azokat orvostechnikai eszközökre vonatkozó tanúsítványokkal igazolták.

Minden Viofor modell az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelvnek és az orvostechnikai eszközökről szóló törvénynek megfelelő orvostechnikai eszköz.







Általános információk

A Viofor JPS rendszer egyedi jellemzői

- szabadalmaztatott mágneses mező jel több csúcsú frekvenciás spektrummal
- széles spektrumú mágneses tér frekvencia – 0,08–195 Hz
- szisztémás applikátorok támogatása az egész test biológiai regenerációjához
- két magnetostimulációs applikátor szinkronban történő alkalmazásának lehetősége a kezelés során a terápia hatásainak növelése érdekében

Támogatott applikátorok – 13 lehetséges applikátorok a következőkhöz:

- szisztémás kezelések
- helyi kezelések közepes és kis területeken
- pontszerű kezelések

Mágneses térfrekvencia – 0,08–195 Hz, a következőkre osztva:

- alapimpulzus frekvenciák
180 Hz-től 195 Hz-ig
- pulzáló frekvenciák kötege
12,5 Hz-től 29 Hz-ig
- kötegcsoport frekvenciák
2,8 Hz-től 7,6 Hz-ig
- sorozat frekvenciák
0,08 Hz-től 0,3 Hz-ig

Egyéb jellemzők

- könnyen használható felület a magnetostimulációs kezelések paramétereinek beállításához
- a terápiás jel alakjának kiválasztása (M1,M2,M3)
- a kezelési idő automatikus beállítása
- távirányító – opcionális
- a kezelési paraméterek listái – a távirányító funkciója
- kezelés számláló
- kapcsoló 230/115 V tápfeszültséghez
- energiatakarékosság – „készenléti” üzemmód
- ház hordfogantyúval
- applikátorok automatikus azonosítása
- három aljzat az applikátorokhoz


















Támogatott applikátorok és kiegészítők*

Az applikátorok széles kínálatból történő kiválasztása lehetővé teszi a betegek vagy a felhasználók egészségügyi szükségleteitől függően különböző kezelési készletek konfigurálását.

Két applikátor, például a matrac, a párna és/ vagy a gyűrű együtt használható – szinkronban a kezelés során, hogy

növelje a terápia hatékonyságát. Az applikátorok az alkalmazási területben és a mágneses térerősségben különböznek (indukciós szint).

Ref. No.:	Név	Ref. No.:	Név
Magnetostimulációs applikátorok			
	1040 3S matrac		1057 Z pont
	1042 6S matrac		1056 S pont
	1047 2S matrac		1061 Klinikai applikátor
	1048 1SE párna		1099 Gyűrű R300
	1045 1S párna		1098 Gyűrű R400
	1046 Pad 2S		1121 Gyűrű R500
	1054 Ellipszis MS		
Kiegészítők			
	1072 Classic Távirányító		1073 Adapter

*az összes támogatott applikátor és a rendelkezésre álló kiegészítők opcionálisak



Válogatott Viofor Classic készletek



Ref. No.: 20001

Classic 3S

A szett tartalma:

Viofor JPS System Classic vezérlőegység
3S matrac
1S párna
Ellipszis MS

A test **napi regenerációjára**, valamint a **mozgásszervrendszer** betegségei és sérülései, a légyszöveti betegségek, valamint számos **neurológiai és fogászati** szövődmény **kezelésének támogatására és rehabilitációjára** szolgáló szett.




Ref. No.: 20002

Classic 3S Complex szet

A szett tartalma:

Viofor JPS System Classic vezérlőegység
3S matrac
1S párna
Ellipszis MS
Gyűrű R400

A szakemberek és az otthoni felhasználók által kiválasztott, **átfogó kezelési és rehabilitációs** támogatást biztosító szett. Az applikátorok lehetővé teszik a helyi megbetegedések és sérülések kezelését, valamint a szisztémás terápiát.

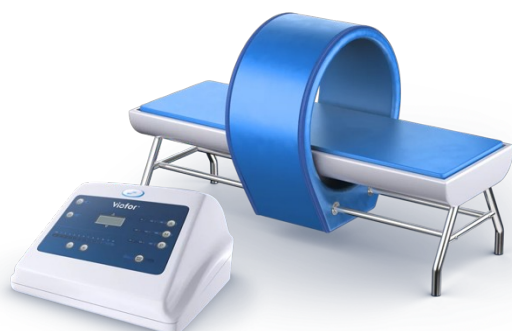

Ref. No.: 20003

Classic Pro

A szett tartalma:

Viofor JPS System Classic vezérlőegység
Klinikai applikátor


Rehabilitációs és wellness klinikákon használják. **A legmagasabb terápiás hatékonyságot a gyűrű applikátorral megerősített matraccal történő egész testi szimultán terápia** lehetősége biztosítja.



PEMF terápia – Magnetostimuláció

Funkcionális beállítás és paraméterek

- **A jel alakja** létrehoz egy több csúcsú frekvenciás spektrumot, amelyet automatikusan állít be három program (P1, P2, P3) és három alkalmazási mód (M1, M2, M3) kombinációja.
- **A mágneses tér frekvenciáját** a gyártó állítja be - **0,08–195 Hz**, a következőkre osztva:
 - alapimpulzus frekvenciák 180 Hz-től 195 Hz-ig
 - kötegelt csoportfrekvenciák 2,8 Hz-től 7,6 Hz-ig
 - 12,5 Hz-től 29 Hz-ig terjedő impulzusfrekvenciák kötege
 - sorozat frekvenciák 0,08 Hz-től 0,3 Hz-ig
- **Terápiás intenzitás** – a mágneses indukció a következőktől függ:
 - kiválasztott applikátor – minél nagyobb az applikátor területe, annál alacsonyabb a mágneses indukciós szint
 - intenzitási szint – billentyűzettel állítható be 0,5-től 12-ig terjedő skálán
- **Kezelési idő** - 8 perc/10 perc/12 perc. Automatikus állítódik be a program (P1, P2, P3) és mód (M1, M2, M) beállítás után
- **Polarizáció** – a mágneses tér irányának automatikus változása (polarizáció)

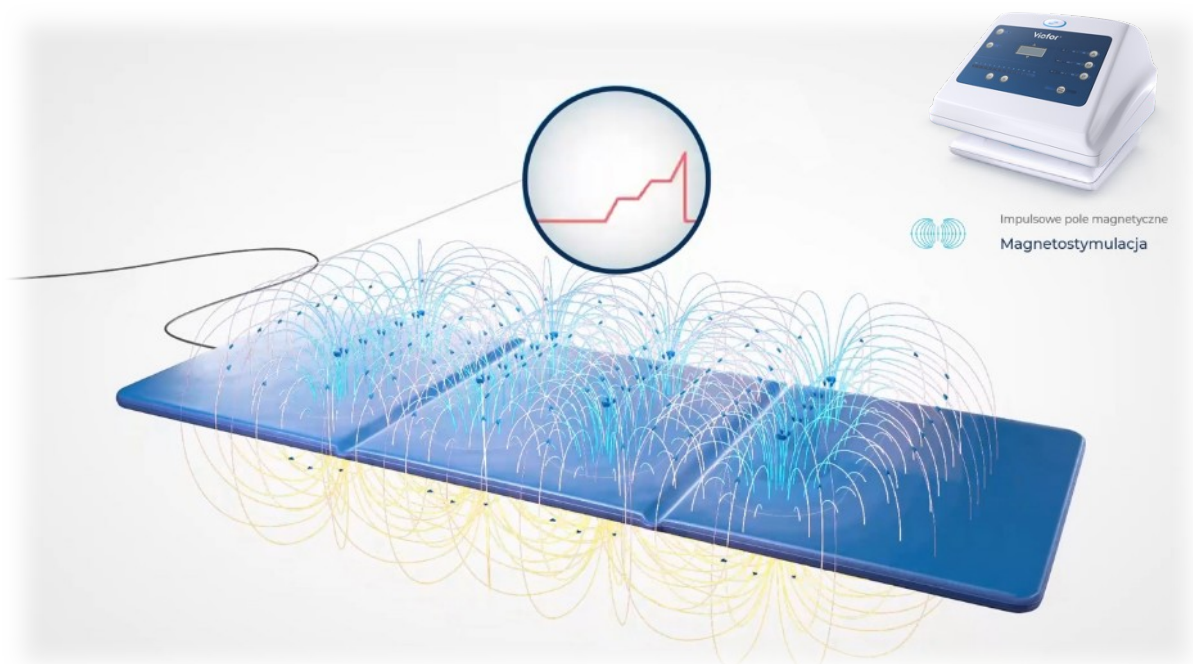



Műszaki leírás*

A vezérlőegység típusa	mikroprocesszor
Teljesítmény feszültség és frekvencia	230 V/115 V ± 10%; 50 Hz/60 Hz
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	< 8 VA,
Maximális energiafogyasztás az alkalmazás során	< 15VA
Kimenet magnetostimulációs applikátorhoz – aljzatok	három "jack" foglalat: G1, G2, G3
Maximális kimeneti feszültség a G1, G2 aljzatban	± 20 V
Maximális áramerősség 12-es intenzitásnál	2 A
Működési mód	folyamatos munka
Megengedett üzemi hőmérséklet/páratartalom	+ 10 °C - + 40 °C/max. 80%
Tárolási és szállítási hőmérséklet/páratartalom	- 20 °C - + 50 °C/max. 90%
Biztonsági osztály	II
Védelem (áramütés ellen)	B
IP védelem	IP 40 – nem védett a víz ellen
Maximális méretek: szélesség, mélység, magasság	32 cm x 27 cm x 17,5 cm
Súly	2,5 kg

*Minden applikátornak saját műszaki specifikációja van; a fenti információk a vezérlőegységre vonatkoznak.



Viofor®



Köszönjük, hogy érdeklődik Viofor JPS rendszer iránt.

